

Blephaclean®

Ce produit est un dispositif médical.
Veuillez lire la notice avant de l'utiliser.
Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

INDICATIONS

BLEPHACLEAN est indiqué dans l'hygiène quotidienne des paupières.

Pour application cutanée seulement, ne pas appliquer directement dans les yeux.

CONVIENT AUX UTILISATEURS SUIVANTS

- Adultes
- Enfants à partir de 3 mois : le produit doit être appliqué par les parents ou soignants

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser BLEPHACLEAN si vous êtes allergique à l'un des composants (voir Description du dispositif).

En l'absence de données suffisantes, n'utilisez pas BLEPHACLEAN, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez sans l'avis de votre médecin.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

BLEPHACLEAN est une lingette stérile, pré-imbregnée d'une lotion pour l'hygiène quotidienne des paupières.

La lotion contient : Capryloyl glycine, hyaluronate de sodium, PEG 8, Poloxamer 184, polysorbate 20, propylène glycol, extrait d'Hydrocotyl (propylène glycol, extrait de Centella asiatica, eau), complexe régulateur de sébum sans conservateur (propylène glycol, extrait de racine d'Iris florentina, sulfate de zinc, PPG-5 Ceteth 20, palmitate de rétinyle (vitamine A), eau, alcool), PEG glycérides 6 capryliques/capriques (Macrogol 6 glycérol caprylocaprate), phosphate dipotassique, hydroxyde de sodium, dihydrogénophosphate de potassium et eau purifiée.

La couleur de la lingette peut varier en raison de la présence d'extraits naturels de plantes dans la formulation, c'est un phénomène normal.

BIENFAITS, PERFORMANCES ET MECANISMES D'ACTION

BLEPHACLEAN est une lingette stérile recommandée pour l'hygiène quotidienne des paupières, en particulier :

- Si vous avez la peau, les paupières ou les yeux sensibles ;
- Pour éliminer les poussières, les pollens et les sécrétions des paupières. Cela peut faire partie des soins si vous souffrez d'allergies ou d'infections ;
- Si vous avez une inflammation ou une infection des paupières de type blépharite, dysfonctionnement des glandes de Meibomius, orgelet ou chalazion. Ces conditions peuvent causer des symptômes de sécheresse oculaire tels que picotements, sensations de sable dans les yeux, irritations et/ou rougeurs ;
- Pour nettoyer les paupières avant des interventions ophtalmiques telles que les injections thérapeutiques réalisées directement dans l'œil (injections intra-vitréennes), les opérations des yeux au laser (LAZIK ou PRK) et la chirurgie de la cataracte. Etant bien toléré, BLEPHACLEAN peut également être utilisé après une chirurgie, sur les conseils de votre médecin ou de votre ophtalmologiste.

BLEPHACLEAN nettoie et élimine les poussières, les pollens et les sécrétions des paupières.

BLEPHACLEAN respecte la peau du contour des yeux et la flore bactérienne naturellement présente.

Ce produit a été testé sous contrôle ophtalmologique.

RECOMMANDATIONS GENERALES

Posologie :

Avant une chirurgie de l'œil, utiliser **deux fois par jours** pendant 5 jours ou suivant les conseils de votre médecin ou de votre pharmacien.

Dans les autres cas, utiliser **deux fois par jour** matin et soir pendant trois semaines, puis une fois par jour pendant trois mois ou suivant les conseils de votre médecin ou de votre pharmacien. Pour les situations chroniques, il peut être nécessaire de poursuivre l'utilisation à long terme.

Aucune formation particulière n'est nécessaire pour utiliser BLEPHACLEAN.

Si vous portez des lentilles de contact : vous devez les retirer avant d'utiliser BLEPHACLEAN. Lavez-vous soigneusement les mains avant d'utiliser la lingette.

Découpez le sachet pour l'ouvrir (Figure 1) et déployez la lingette située à l'intérieur ; n'utiliser aucun outil pour ouvrir le sachet.



Figure 1 : Ouverture du sachet

Enroulez la lingette autour de votre index.

L'œil fermé, appliquez délicatement la lingette sur les paupières et sur la base des cils. (Figure 2).

Massez délicatement les paupières par des petits mouvements circulaires pour éliminer en douceur croûtes, sécrétions et maquillage.



Figure 2 : Nettoyage des paupières et des cils

Face à un miroir, tirez doucement votre paupière inférieure vers le bas avec votre autre main, puis frottez le long du bord de votre paupière inférieure avec la lingette enroulée autour de votre doigt (figure 3).



Figure 3 : Nettoyage du bord libre palpébral
Répétez l'opération pour l'autre œil, en utilisant une nouvelle lingette.

Il n'est pas nécessaire de rincer après utilisation de la lingette BLEPHACLEAN.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez que l'emballage est intact avant la première utilisation : utiliser uniquement si le sachet n'est pas ouvert.

Ne pas réutiliser la lingette, car elle sera moins efficace et cela peut entraîner un risque de contamination.

Veuillez contacter votre professionnel de santé si les symptômes empirent ou ne s'améliorent pas.

AVERTISSEMENTS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. Évitez de mettre BLEPHACLEAN dans l'œil : vous risquez d'avoir une sensation de brûlure. En cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau stérile ou avec une solution saline.

EFFETS SECONDAIRES

Les effets secondaires suivants ont été rapportés avec BLEPHACLEAN : sensation de brûlure ou de démangeaison pendant quelques minutes après l'application, rougeur ou gonflement des paupières, rougeur oculaire, réactions allergiques. Dans ce cas, si vous portez des lentilles de contact, ne les remettez pas.

Si vous remarquez un effet secondaire ou une sensation inhabituelle après avoir utilisé le produit, veuillez contacter un professionnel de santé et signaler le problème au distributeur local, au fabricant ou à une autorité de santé (voir les contacts en fin de notice).

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'ELIMINATION DES DECHETS

À conserver entre 8 °C et 25 °C.

Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.

Jetez la lingette immédiatement après utilisation.

Ne pas utiliser le produit après la date d'expiration indiquée sur le sachet ou l'emballage extérieur.

La date d'expiration se réfère au dernier jour du mois indiqué si l'emballage est resté intact et dans des conditions de stockage appropriées.

Éliminez les déchets de façon responsable conformément aux réglementations locales (le sachet doit être jeté avec les ordures ménagères, le carton extérieur et la notice sont recyclables).

Date d'émission et version de la notice : Ver.2 09/2019

Fabricant :

Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand
Cedex 2 France

www.laboratoires-thea.com

Section « Contactez-nous »


Distributeur : THEA PHARMA, Zone industrielle du Brezet 12 rue Louis Blériot 63100 Clermont-Ferrand

Autorité de santé : ANSM 143/147, boulevard Anatole France 93285 SAINT-DENIS CEDEX

CE 0459

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES PRESENTS SUR L'EMBALLAGE

	Fabricant		Numéro de lot
	Date de fabrication		Date limite d'utilisation
	Limites de température		Dispositif stérilisé par irradiation
	Dispositif médical		Consulter la notice
	Usage unique		Ne pas utiliser le produit si l'emballage est endommagé
	Avertissement		

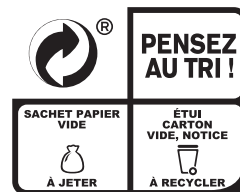

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRELF

