

Si vous remarquez un effet secondaire ou une sensation inhabituelle après avoir utilisé le produit, veuillez contacter un professionnel de santé et signaler le problème au distributeur local, au fabricant ou à une autorité de santé (voir les contacts en fin de notice).

#### CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'ÉLIMINATION

À conserver entre 8 °C et 30 °C.  
Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil directe ou à l'humidité.

Jetez l'unidose immédiatement après utilisation même s'il reste de la solution. Conservez les unidoses fermées dans leur sachet afin de les protéger de la lumière. Les unidoses non ouvertes peuvent être utilisées jusqu'à trois mois après l'ouverture du sachet.

Ne pas utiliser le produit après la date d'expiration indiquée sur les unidoses ou sur l'emballage extérieur.

La date d'expiration se réfère au dernier jour du mois indiqué, si l'emballage est resté intact et dans des conditions de stockage appropriées.

Éliminez les déchets de façon responsable conformément aux réglementations locales (les unidoses et le sachet doivent être jetés avec les ordures ménagères, le carton extérieur et la notice sont recyclables).

**Date d'émission et version de la notice :**  
**Ver. 3 11/2019**

#### Fabricant :

 Laboratoires Théa  
12 rue Louis Blériot  
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2  
France

[www.laboratoires-thea.com](http://www.laboratoires-thea.com)  
Section « Contactez-nous »

#### Distributeur :












THEA PHARMA  
Zone industrielle du Brézet  
12 rue Louis Blériot  
63100 Clermont-Ferrand

#### Autorité de santé :

ANSM,  
143/147 boulevard Anatole France  
93285 Saint-Denis Cedex

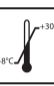

#### SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES PRÉSENTS SUR L'EMBALLAGE

	Fabricant		Dispositif médical
	Numéro de lot		Consulter la notice
	Dispositif stérilisé par un procédé de traitement aseptique		Date de fabrication
	Date limite d'utilisation		Ne pas utiliser le produit si l'emballage est endommagé
	Limites de température		Avertissement
	Usage unique		

Théa®, THEALOSE® sont des marques de LABORATOIRES THEA

