

Product: THEAWASH 10UD cOTC Pack1 - 10210U10L01 - (FRE)
 Manufacturer: LABORATOIRE UNITHER AMIENS
 Type of PI: LEAFLET
 Remarks:
 Fonts: Futura STD, Helvetica Lt STD
 Subtitle size: 10 pt Text size: 8 pt
 Code size: 7 pt
 Global version: 0222-3
 Customer version: 1
 Technical version: 2

PI Théa's Code: N10210U10L1/0222
 PI Manufacturer's Code: 65NOT3866/A
 Dimensions (WH): 180 x 280 mm
 Théa's Template: UNAM-N-180x280-1221-1
 Title size: -
 Interline size: 3.5 pt
 Soft: InDesign (CS6)
 Global version date: 2022-02-17
 Customer version date: 2022-02-14
 Technical version date: 2022-02-17

Used colours

- Black
- Black 80 %
- Black 60 %
- P 304 C

!! Customer approval !!

This printing proof represents exactly the way the PI will be printed.
 This means that by putting your signature on it, you fully accept its design, texts and that anything comply on a regulatory point of view to your local requirements.

Name:
 Date:
 Signature:

!! Manufacturer approval !!

Your signature on this pdf means that you guarantee that technicals aspects of this PI comply with the size of the PI, the cutting shapes, the margins, the codes and their positions, the reserved areas, the varnished areas, the braille and all the embossed elements and all the necessary marks in order to ensure that the finished product will look at what is shown below.
 You should not modify this pdf.

Name:
 Date:
 Signature:



FR

THEAWASH®

Solution de lavage oculaire stérile, sans conservateur, en récipient unidose

STERILE A

Non injectable

1. COMPOSITION

Chlorure de sodium (1.2%), acide borique (1.8%), borate de sodium, eau reconstituée de rose, eau purifiée qsp 5 mL.

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

THEAWASH se présente sous forme de solution transparente pour lavage oculaire stérile en boîte de 10 récipients unidoses de 5 mL.

3. POPULATION

Adultes et enfants.

4. INDICATIONS

THEAWASH peut être utilisé pour :

- L'hygiène oculaire quotidienne ;
- Le traitement adjuvant à la pathologie infectieuse, allergique ou inflammatoire des paupières, des conjonctives et de la cornée ;
- Le traitement des irritations superficielles des paupières et du globe oculaire : le lavage oculaire facilite l'élimination de corps étrangers qui irritent l'œil, tels que sable, moucherons, poussières, pollens, débris de maquillage... et permet d'atténuer la sensation de gêne ;
- L'hygiène post opératoire.


THEAWASH participe à l'hydratation oculaire.

5. COMMENT UTILISER THEAWASH ?


POSOLOGIE : 2 à 8 lavages oculaires par jour.

Bien s'assurer au préalable que le récipient unidose n'ait pas déjà été utilisé ou endommagé.

Etape 1 : Se laver soigneusement les mains avant de procéder au lavage oculaire.

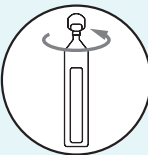

Etape 2 : Détacher une unidose et l'ouvrir en tournant sa partie supérieure.

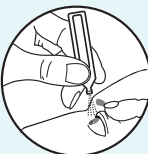

Etape 3 : Le lavage se fait de façon directe par jet en appuyant légèrement sur le flacon.

Il est recommandé de tirer la paupière inférieure vers le bas, regard en haut, puis la paupière supérieure vers le haut, regard en bas, afin de bien répartir la solution sur toute la surface oculaire pour éliminer les corps étrangers qui irritent l'œil, augmenter le volume du film lacrymal et hydrater les tissus.

6. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas injecter, ne pas avaler.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Se laver soigneusement les mains avant de procéder au lavage oculaire.

Si vous êtes porteur de lentilles de contact, vous pouvez utiliser ce produit, cependant, il est nécessaire de les retirer avant de procéder au lavage de l'œil.

Usage unique : le flacon unidose doit être utilisé immédiatement après ouverture et jeté après utilisation.

Un flacon peut être utilisé pour le traitement des deux yeux.

Eviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon.

L'efficacité d'un collyre ou d'une pommade oculaire peut être perturbée par l'instillation simultanée de la solution de lavage oculaire. En cas de traitement concomitant, il convient d'attendre 10 minutes entre chaque instillation oculaire et de toujours commencer par le lavage avec la solution **THEAWASH** sauf mention spéciale de votre médecin.

En cas de survenue, de persistance ou d'aggravation d'une irritation ou d'un larmoiement excessif ou de troubles de la vue, arrêter l'emploi de la solution et consulter rapidement un médecin.

7. CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Jeter le récipient unidose immédiatement après utilisation.

Ne pas réutiliser un récipient unidose déjà ouvert.

Ce dispositif médical ne contenant pas de conservateur, une réutilisation conduirait au risque d'administrer une solution contaminée.

Avant ouverture, conserver les récipients unidoses à température ambiante.

THEAWASH est un dispositif médical de classe Is.

Date d'obtention du marquage CE : 18/04/2006.

Date de révision de la notice d'utilisation : Novembre 2012.

Fabricant :



Laboratoire UNITHER

151, Rue André Durouchez - Espace Industriel Nord
CS 28028 - 80084 AMIENS Cedex 2 - FRANCE

Distributeur :

THEA PHARMA

Zone industrielle du Brezet

12 rue Louis Blériot

63100 Clermont-Ferrand

Fabriqué en France.

© 2022, Laboratoires Théa. Tous droits réservés.

CE 0459

