

FR
NOTICE D'UTILISATION

BLEPHA EYEBAG®

Ce produit est un dispositif médical.

Merci de lire attentivement les instructions avant utilisation.
Conservé la notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

-  Procure confort & traite les DGM - Biphariques
-  Recommandé par les ophtalmologistes
-  Facile à utiliser - Utilisation au micro-ondes

1. INDICATIONS

BLEPHA EYEBAG est un masque chauffant réutilisable. **BLEPHA EYEBAG** traite les Dysfonctionnements des Glandes de Meibomius® (DGM) et les Biphariques (inflammation des paupières). Il apporte un confort et soulage les symptômes de l'œil sec associé à un DGM (le DGM est une cause d'œil sec), et autres affections oculaires comme :

- Orgelet
- Chalazion

BLEPHA EYEBAG peut également soulager l'inconfort lié au port des lentilles de contact chez les patients souffrant d'œil sec.

Voie oculaire uniquement.

2. CONVIENT AUX :

- Adultes (incluant les femmes enceintes ou allaitantes).
- Enfants à partir de 3 ans : les parents ou soignants doivent prendre en main le produit

3. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser **BLEPHA EYEBAG** si la peau du contour des yeux est lésée ou soignée. Ne pas utiliser **BLEPHA EYEBAG** sur votre visage si vous avez une hypersensibilité connue au lin, graine de lin ou tous autres composants de **BLEPHA EYEBAG**.

4. DESCRIPTION DU DISPOSITIF

BLEPHA EYEBAG est un masque pour les yeux réutilisable, fabriqué à la main et breveté, en soie et coton naturels et rempli de lin traité (graines de lin). Il ne contient aucun autre additif et pas de plastique. **BLEPHA EYEBAG** est également respectueux de l'environnement car son étui et sa notice sont biodégradables et recyclables.

5. BIENFAITS, PERFORMANCE ET MECANISMES D'ACTION

Dans le bord des paupières supérieures et inférieures se trouvent des petites glandes, les glandes de Meibomius, qui sécrètent une substance huileuse nécessaire pour lubrifier et nettoyer la surface de l'œil, et permettre au film lacrymal de s'étaler efficacement. Lorsque les glandes ne fonctionnent pas normalement, l'huile se transforme en une cire épaisse et obstrue les glandes. Cela signifie que la surface de l'œil n'est pas bien lubrifiée. Les ophtalmologistes recommandent de réchauffer l'œil comme première étape de routine pour l'hygiène des paupières en cas de DGM, de biphariques et d'affections connexes telles que l'œil sec, le chalazion et l'orgelet. Par son action chauffante, **BLEPHA EYEBAG** contribue à un œil naturel et sain en aidant à libérer les lipides bloqués et en permettant leur diffusion sur toute la surface de l'œil. Ainsi, il limite l'évaporation de l'eau pour maintenir l'hydratation des yeux.

BLEPHA EYEBAG agit rapidement et soulage durablement les symptômes tels que la sensation de sécheresse oculaire, l'inconfort oculaire, les yeux fatigués ou douloureux, les yeux rouges, la sensation de grain de sable ou de corps étranger, les picotements. Il apaise également les paupières gonflées et enflammées. **BLEPHA EYEBAG** a été développé par un ophtalmologiste et sa sécurité et son efficacité ont été prouvées par plusieurs études cliniques.

BLEPHA EYEBAG est un masque chauffant facile à utiliser et agréable qui peut être utilisé quotidiennement pour permettre un meilleur confort oculaire.

6. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Aucune formation particulière n'est requise pour utiliser **BLEPHA EYEBAG**. Si vous portez des lentilles de contact ou des lunettes de vue, retirez-les toujours avant d'utiliser **BLEPHA EYEBAG**.

Lavez soigneusement vos mains, votre visage et vos paupières et démaquillez-vous avant d'utiliser **BLEPHA EYEBAG**.

POSOLOGIE : Utilisez votre **BLEPHA EYEBAG**, deux fois par jour, matin et soir pendant 5 à 10 minutes à chaque séance, pendant les 2 premières semaines. Ensuite, 3 à 4 fois par semaine ; un ajustement est possible en fonction de la sévérité de vos symptômes.

BLEPHA EYEBAG est sûr et efficace jusqu'à **200 utilisations**, avant d'être remplacé.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Avant d'utiliser **BLEPHA EYEBAG**, assurez-vous qu'il ne présente aucun défaut. **BLEPHA EYEBAG** ne doit être chauffé que par un adulte responsable. Retirez **BLEPHA EYEBAG** de la boîte et placez-le sur une assiette propre, sèche et adaptée au micro-ondes. Assurez-vous toujours que le plat ou l'assiette que vous utilisez est parfaitement propre car tout peut résidu alimentaire peut devenir très chaud et ces "points chauds" peuvent provoquer de petites brûlures dans le matériau du **BLEPHA EYEBAG**.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Placez **BLEPHA EYEBAG** dans un four à micro-ondes comme décrit ci-dessous. Chauffez votre **BLEPHA EYEBAG** pendant 1 minute à pleine puissance dans un micro-ondes en bon état de marche et laissez-le refroidir complètement.

POUR TOUTES LES UTILISATIONS ULTÉRIEURES

Étape 1 : Placer **BLEPHA EYEBAG** dans un micro-ondes comme décrit ci-dessus et chauffer selon le tableau ci-dessous :

| POUISSANCE du micro-ondes | DURÉE DE CHAUFFAGE |
|---------------------------|--------------------|
| Au-dessus de 750 W | 30 secondes |
| 750 W et moins | 40 secondes |

Attention : si votre micro-ondes a une puissance supérieure à 1000 W, vous pourriez avoir besoin de réduire la durée.

Réchauffez uniquement lorsque le masque est à température ambiante. Il peut être dangereux de continuer à chauffer **BLEPHA EYEBAG** qui est déjà chaud, car cela peut entraîner une surchauffe. Laissez **BLEPHA EYEBAG** refroidir complètement avant de le réchauffer.

⚠ Assurez-vous de ne régler que 30 secondes, et non 30 minutes ! Restez à côté de votre micro-ondes pendant qu'il chauffe. **N'utilisez pas la grille métallique fournie avec certains micro-ondes, car elle pourrait brûler BLEPHA EYEBAG.**

Étape 2 : Secouez **BLEPHA EYEBAG** pour répartir de façon homogène les graines de lin à l'intérieur du masque et pour favoriser la diffusion de la chaleur.

Étape 3 : Vérifiez que **BLEPHA EYEBAG** est suffisamment chaud, mais pas trop, avant de le placer sur les paupières fermées. Vérifiez soigneusement la température du côté gris (côté soie) en touchant **BLEPHA EYEBAG** avec votre poignet. S'il est trop chaud, attendez quelques minutes, vérifiez à nouveau la température avant de l'appliquer sur l'œil.

Étape 4 : Lorsque la température est assez chaude, allongez-vous et appliquez le masque sur les yeux fermés. Utilisez l'un ou l'autre côté selon votre préférence. Le côté noir sera plus frais et vous souhaitez peut-être passer au côté soie au cours de ces 10 minutes. Détendez-vous avec **BLEPHA EYEBAG** en place pendant 5 à 10 minutes.

Étape 5 : Retirez **BLEPHA EYEBAG** de vos yeux. Il est normal d'observer une rougeur de la peau après utilisation en raison de l'effet chauffant du masque.

Étape 6 : Immédiatement après le réchauffement, massez les paupières fermées pour libérer l'huile des glandes de Meibomius. Répétez cette opération plusieurs fois pendant environ 30 secondes.

Étape 7 : Vous pouvez également nettoyer votre paupière avec un produit d'hygiène des paupières après l'utilisation du **BLEPHA EYEBAG** et le massage.

Étape 8 : Remettez toujours **BLEPHA EYEBAG** dans sa boîte après utilisation pour le garder propre, sec et sûr.

Grâce à chaque chauffage au micro-ondes, la quantité de bactéries du **BLEPHA EYEBAG** est minimisée.

7. PRECAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez que l'emballage est intact avant la première utilisation de ce produit.

Avant d'utiliser **BLEPHA EYEBAG**, assurez-vous qu'il ne présente aucun défaut. Veillez à utiliser un micro-ondes en état de marche et fonctionnant correctement pour chauffer votre **BLEPHA EYEBAG**.

Chaque **BLEPHA EYEBAG** ne doit être utilisé que par une seule personne.

Ne partagez pas **BLEPHA EYEBAG** entre différentes personnes pour éviter toute contamination croisée.

Vous devez contacter un professionnel de santé si vos symptômes persistent ou s'aggravent avec l'utilisation de **BLEPHA EYEBAG**.

8. AVERTISSEMENTS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. Utilisez toujours votre **BLEPHA EYEBAG** conformément à ces instructions.

Il est habituel que **BLEPHA EYEBAG** soit légèrement humide lors de la première utilisation.

Vérifiez soigneusement la température avant de l'utiliser.

Si vous souffrez d'autres affections oculaires spécifiques (comme une dystrophie cornéenne ou des infections cornéennes récurrentes), vous devez utiliser **BLEPHA EYEBAG** avec précaution et suivre les conseils de votre ophtalmologiste.

Si vous souffrez de rosacée, la chaleur peut augmenter les rougeurs. Utilisez avec précaution.

Les graines de lin contenues dans votre **BLEPHA EYEBAG** ne sont pas de qualité alimentaire et ne doivent pas être ingérées.

Le chauffage d'un **BLEPHA EYEBAG** humide peut provoquer des brûlures.

9. COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE BLEPHA EYEBAG ?

Ne lavez pas ou ne mouillez pas votre **BLEPHA EYEBAG** (les détergents et les poudres à laver peuvent provoquer une dermatite de contact irritante).

Les taches sur la surface du **BLEPHA EYEBAG** lors de son utilisation sont normales et inoffensives.

Des lingettes humides ne doivent pas être utilisées pour nettoyer la surface du **BLEPHA EYEBAG**.

10. EFFETS SECONDAIRES

Les effets secondaires suivants peuvent être observés : irritation des yeux/des paupières, douleur, rougeur et démangeaisons.

Si vous constatez des effets secondaires ou des sensations inhabituelles après avoir utilisé ce produit, veuillez contacter un professionnel de la santé et signaler l'information au distributeur local, au fabricant ou à l'autorité sanitaire locale (voir les contacts à la fin de la notice).

11. CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'ÉLIMINATION

Conservez votre **BLEPHA EYEBAG** dans sa boîte, dans un endroit propre et sec. Votre **BLEPHA EYEBAG** doit être remplacé après 6 mois d'utilisation s'il est utilisé une fois par jour.

Éliminez le produit de manière responsable et conformément aux directives locales (le dispositif doit être éliminé avec les déchets ménagers ; le carton extérieur et la notice sont biodégradables et recyclables).

Date d'émission et version de la notice: Ver.3 09/2022

Fabricant :

Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 France
www.laboratoires-thea.com
Section : Contactez-nous >

Distributeur : THEA PHARMA

37 rue Georges Besse
63000 Clermont-Ferrand
France

Autorité de santé - NSM

143/147, boulevard Anatole France
93285 Saint-Denis Cedex

© 2021, Laboratoires Théa. All rights reserved.
BLEPHA EYEBAG® est une marque des Laboratoires Théa.

Made in UK

12. INSTAURER UNE ROUTINE OCULAIRE POUR DES YEUX ET DES PAUPIÈRES EN BONNE SANTÉ

Des soins oculaires quotidiens en routine sont recommandés par les experts pour garder les yeux et les paupières en bonne santé en cas de sécheresse oculaire associée à un DGM.

1. NETTOYAGE DES PAUPIÈRES










Le protocole de nettoyage des paupières est composé de 3 étapes :

- **Étape 1 : Réchauffement**
La chaleur fait fondre les lipides bloqués dans la glande pour permettre au film lacrymal de s'étaler efficacement.
- **Étape 2 : Massage**
Masser les paupières pour aider à évacuer le meibum contenu dans les glandes de Meibomius obstruées.
- **Étape 3 : Nettoyer**
Nettoyer les paupières et les cils pour éliminer les sécrétions, les dépôts ou les croûtes à l'aide d'un produit de soin oculaire adapté.

2. HYDRATATION

Idealement avec un collyre sans conservateur pour garder l'œil hydraté et confortable pendant la journée.

13. SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES PRÉSENTS SUR L'EMBALLAGE

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Fabricant |  | Consulter la notice |
|  | Numéro de lot |  | Patient unique - utilisations multiples |
|  | Date de fabrication |  | Dispositif médical |
|  | Craint l'humidité |  | Avertissement |
|  | Référence catalogue |  | Date limite d'utilisation |
|  | Ne pas utiliser le produit si l'emballage est endommagé | | |

ISTRUZIONI PER L'USO

BLEPHA EYEBAG®

Questo prodotto è un dispositivo medico.
Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
Conservare questo foglio illustrativo perché potrebbe essere necessario consultarlo nuovamente.

- Comfort e trattamento della MGD* - Biefarite
- Raccomandato dagli oftalmologi
- Facile da usare - Riscaldabile nel microonde

1. INDICAZIONI

BLEPHA EYEBAG è una mascherina riscaldante riutilizzabile. **BLEPHA EYEBAG** serve al trattamento della disfunzione delle ghiandole di Meibomio (MGD*, *Meibomian Gland Dysfunction*) e della biefarite. Restituisce comfort e allevia i sintomi dell'occhio secco associati a disfunzione delle ghiandole di Meibomio (MGD) (la MGD è la principale causa dell'occhio secco) e ad altre patologie oculari correlate, come:

- Orzaio
- Calazio

BLEPHA EYEBAG può anche alleviare il disagio avvertito dai portatori di lenti a contatto che soffrono di occhio secco.

Solo per uso oculare.

2. INDICATA PER

- Adulti (compresa donna in gravidanza o in allattamento),
- Bambini a partire dai 3 anni di età: il prodotto deve essere maneggiato dai genitori o da chi accudisce i bambini.

3. CONTROINDICAZIONI

Non usare **BLEPHA EYEBAG** se la cute periorbitale è scopolata o sanguina. Non applicare **BLEPHA EYEBAG** sul viso in caso di ipersensibilità nota al lino, ai semi di lino o a qualsiasi altro componente di **BLEPHA EYEBAG**.

4. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

BLEPHA EYEBAG è una mascherina per gli occhi riutilizzabile, brevettata, realizzata a mano in seta naturale e cotone, e riempita con lino non trattato (semi di lino). Non contiene altri additivi né materiali plastici. Grazie alla confezione e al foglio illustrativo biodegradabili e riciclabili, **BLEPHA EYEBAG** è anche ecosostenibile.

5. BENEFICI, PRESTAZIONI E MECCANISMO D'AZIONE

Lungo i margini della palpebra superiore e inferiore sono presenti le ghiandole di Meibomio. Si tratta di piccole ghiandole che secerono una sostanza oleosa che lubrifica e deturga la superficie anteriore dell'occhio e consente un'efficace distribuzione del film lacrimale. Quando queste ghiandole non funzionano bene, la loro secrezione oleosa diventa molto densa e intasa le stesse ghiandole. A causa di ciò la superficie anteriore dell'occhio risulta scarsamente lubrificata. Per la pulizia di routine delle palpebre in caso di MGD, biefarite e patologie correlate, come occhio secco, calazio e orzaio, gli oftalmologi raccomandano prima di tutto di riscaldare l'occhio.

Con la sua azione riscaldante, **BLEPHA EYEBAG** contribuisce a mantenere la normale salubrità dell'occhio, facilitando il rilascio dei lipidi bloccati e la loro diffusione sulla superficie oculare. In tal modo viene ridotta l'evaporazione della fase acquosa del film lacrimale e gli occhi rimangono idratati.

BLEPHA EYEBAG agisce rapidamente e a lungo, alleviando la sensazione di occhio secco, il fastidio, la stanchezza o il dolore oculare, l'arrossamento, e la sensazione di corpo estraneo e di bruciore. Svolge inoltre un'azione lenitiva anche su palpebre gonfie e infiammate.

BLEPHA EYEBAG è stata sviluppata da un oftalmologo, e diversi studi clinici ne hanno dimostrato la sicurezza e l'efficacia.

BLEPHA EYEBAG è una mascherina riscaldante, d'uso facile e piacevole, la cui applicazione quotidiana dona agli occhi una sensazione di comfort.

6. RACCOMANDAZIONI GENERALI PER L'USO

Non sono richieste speciali abilità per usare **BLEPHA EYEBAG**.

Prima di usare **BLEPHA EYEBAG** occorre togliere gli occhiali o le lenti a contatto.

Prima di usare BLEPHA EYEBAG, lavare accuratamente mani, viso e palpebre, e rimuovere il trucco.

POSOLOGIA: Per le prime 2 settimane, applicare **BLEPHA EYEBAG**, due volte al giorno, mattina e sera, 5-10 minuti ogni volta. Dopo le prime 2 settimane, la normale cadenza di applicazione è da 3 a 4 volte alla settimana; in base alla gravità dei sintomi è possibile regolare la frequenza.

BLEPHA EYEBAG resta sicura ed efficace fino a 200 applicazioni, prima di sostituirla.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Prima di usare **BLEPHA EYEBAG**, assicurarsi che non sia danneggiata. **BLEPHA EYEBAG** deve essere riscaldato solo da un adulto consapevole.

Estrarre **BLEPHA EYEBAG** dalla scatola e deporlo su un piatto pulito, asciutto e adatto all'uso nel microonde. Assicurarsi sempre che il piatto utilizzato sia perfettamente pulito. Questo perché qualsiasi minimo residuo di cibo, surriscaldandosi, può provocare piccole bruciature sul materiale di cui è fatto **BLEPHA EYEBAG**.

PRIMA DEL PRIMO USO

Introdurre **BLEPHA EYEBAG** nel microonde, come descritto sopra. Riscaldare **BLEPHA EYEBAG** per 1 minuto in un forno a microonde ben funzionante e alla massima potenza, quindi lasciare raffreddare completamente.

PER TUTTI GLI USI SUCCESSIVI

Passaggio 1: introdurre **BLEPHA EYEBAG** nel microonde come descritto sopra e riscaldare secondo quanto riportato nella seguente tabella:

| POTENZA del forno a microonde | DURATA DEL RISCALDAMENTO |
|-------------------------------|--------------------------|
| Oltre 750 W | 30 secondi |
| 750 W e inferiore | 40 secondi |

Attenzione: se il microonde ha una potenza superiore a 1.000 W, potrebbe essere necessario ridurre il tempo di permanenza.

Riscaldare solo a partire da temperatura ambiente. Riscaldare ulteriormente **BLEPHA EYEBAG** quando è già caldo può essere pericoloso e comportare il surriscaldamento. Prima di riscaldare di nuovo **BLEPHA EYEBAG**, lasciarlo raffreddare completamente.

⚠ Assicurarsi che il tempo impostato sia 30 secondi, non 30 minuti! Non allontanarsi dal microonde durante il riscaldamento. **Non usare la piastra metallica in dotazione ad alcuni microonde perché potrebbe bruciare BLEPHA EYEBAG.**

Passaggio 2: scuotere **BLEPHA EYEBAG** per distribuire uniformemente i semi di lino al suo interno, aiutando così la diffusione del calore.

Passaggio 3: prima di applicare **BLEPHA EYEBAG** sulle palpebre chiuse, controllare che sia calda in modo piacevole ma non eccessivo. Testare attentamente sul polso la temperatura del lato grigio (in seta) di **BLEPHA EYEBAG**. Se è troppo calda, attendere qualche minuto, quindi controllare di nuovo e poi applicare sugli occhi.

Passaggio 4: dopo essersi assicurati che la temperatura è confortevole, sdraiarsi e applicare la mascherina sulle palpebre chiuse.

Applicare un lato o l'altro della mascherina in base alle proprie preferenze. Il lato nero è meno caldo. Si può poi passare al lato in seta entro 10 minuti.

Rilasciarsi con **BLEPHA EYEBAG** in posizione per 5-10 minuti.

Passaggio 5: rimuovere **BLEPHA EYEBAG** dagli occhi. A causa dell'effetto riscaldante della mascherina, è normale che la pelle risulti arrossata dopo l'uso.



Esempio di tecnica di massaggio

Passaggio 6: terminata l'applicazione, massaggiare le palpebre chiuse per facilitare la distribuzione della secrezione oleosa delle ghiandole di Meibomio. Ripetere diverse volte per circa 30 secondi.

Passaggio 7: dopo l'uso di **BLEPHA EYEBAG** e il massaggio, è possibile detergere le palpebre con uno specifico prodotto per la pulizia palpebrale.

Passaggio 8: dopo l'uso, riporre sempre **BLEPHA EYEBAG** nella sua scatola per conservare la mascherina sempre pulita, asciutta e al sicuro.

Il riscaldamento nel microonde riduce al minimo la carica batterica eventualmente presente su **BLEPHA EYEBAG**.

7. PRECAUZIONI D'USO:

Prima del primo utilizzo, verificare che la confezione del prodotto sia integra.

Prima di usare **BLEPHA EYEBAG**, assicurarsi che non sia danneggiata.

Per riscaldare il proprio **BLEPHA EYEBAG** assicurarsi che il microonde utilizzato sia revisionato e ben funzionante.

Ciascuna mascherina **BLEPHA EYEBAG** deve essere usata da una sola persona.

Per evitare contaminazioni crociate, non condividere **BLEPHA EYEBAG** con altri.

Se utilizzando **BLEPHA EYEBAG** i sintomi oculari non migliorano o addirittura peggiorano, rivolgersi a un medico.

8. AVVERTENZE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Utilizzare **BLEPHA EYEBAG** attenendosi sempre alle presenti istruzioni.

È normale che **BLEPHA EYEBAG** sia leggermente umido al primo utilizzo.

Controllare attentamente la temperatura prima dell'uso.

In presenza di specifiche patologie oculari (come distrofia corneale o infezioni corneali ricorrenti) occorre utilizzare **BLEPHA EYEBAG** con cautela e attenersi alle raccomandazioni del proprio oculista.

Nei soggetti con rosacea, il calore può aumentare il rossore. Usare con cautela.

I semi di lino contenuti in **BLEPHA EYEBAG** non sono di tipo alimentare pertanto non devono essere ingeriti.

Riscaldare una mascherina **BLEPHA EYEBAG** bagnata può provocare scottature.

9. COME MANUTENERE BLEPHA EYEBAG?

Non lavare né bagnare la mascherina **BLEPHA EYEBAG** (detergenti e detersivi possono causare dermatiti da contatto in lino). La comparsa di macchie sulla superficie di **BLEPHA EYEBAG** dopo l'uso è normale e innocua.

Non pulire la superficie di **BLEPHA EYEBAG** con salviette umide.

10. EFFETTI COLLATERALI

Possano verificarsi i seguenti effetti collaterali: irritazione di occhi/ciglia, dolore, arrossamento e prurito.

In caso di effetti collaterali o di sensazioni inusite dopo l'applicazione del prodotto, rivolgersi a un operatore sanitario e riferire le dovute informazioni al distributore locale, al produttore o alle autorità sanitarie locali (i recapiti sono indicati in calce alle presenti istruzioni per l'uso).

11. CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare **BLEPHA EYEBAG** nella sua scatola, in un luogo pulito e asciutto.

Se utilizzata una volta al giorno, la mascherina **BLEPHA EYEBAG** deve essere sostituita dopo 6 mesi.

Smaltire il prodotto in modo responsabile e conformemente alle linee guida locali (il dispositivo deve essere smaltito come rifiuto domestico; la confezione esterna e il foglio illustrativo sono biodegradabili e riciclabili).

Data di pubblicazione e versione delle istruzioni per l'uso: Vers. 3 09/2022

Fabbricante:

Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Francia
www.laboratoires-thea.com
Sezione "Contact us"

IT

Distributore: Thea Farma SpA
Via Tiziano, 32
20145 Milano

Autorità sanitaria: Ministero della Salute
via Giorgio Ribotta 5,
00144 ROMA

© 2021, Laboratoires Théa. All rights reserved.
BLEPHA EYEBAG®, è un marchio commerciale di Laboratoires Théa.

Fabbricato nel Regno Unito.

12. IMPOSTARE LA ROUTINE OCULARE PER OCCHI PALPEBRE SANI

In caso di occhio secco associato a MGD, gli esperti raccomandano una cura quotidiana per mantenere occhi e palpebre sani.

1. PULIZIA DELLE PALPEBRE

Il regime di pulizia delle palpebre comprende 3 passaggi:

- **Passaggio 1: Riscaldamento**
Il calore scioglie le concrezioni lipidiche all'interno della ghiandola permettendo così l'efficace distribuzione del film lacrimale.
- **Passaggio 2: Massaggio**
Massaggiare le palpebre per facilitare l'eliminazione del meibum che intasa le ghiandole di Meibomio.
- **Passaggio 3: Pulizia**
Pulire palpebre e ciglia con un prodotto adatto alla cura degli occhi per rimuovere secrezioni, depositi o crosticine.

2. IDRATAZIONE

Ideale l'uso di un collirio privo di conservanti per mantenere l'occhio idratato e in uno stato di comfort tutto il giorno.

13. SIGNIFICATO DEI PITTGRAMMI APOSTI SULLA CONFEZIONE

| | | | |
|--|---|--|------------------------------------|
| | Fabbricante | | Consultare le istruzioni per l'uso |
| | Numero di lotto | | Singolo paziente - Uso ripetuto |
| | Data di fabbricazione | | Dispositivo medico |
| | Tenere al riparo dall'umidità | | Attenzione |
| | Non utilizzare se la confezione è danneggiata | | Numero di catalogo |
| | Data di scadenza | | |